

# HIALUROFRAX®

*HialuroFrax – dzięki tej maszynie aplikacja kwasu hialuronowego oraz frakcjonowanie skóry dostępne są dla kosmetyczek i kosmetologów.*



**TIME MACHINE®**  
World Patent

**H**ialuroFrax został tak opracowany, aby mogli wykorzystywać go nie tylko lekarze, ale również kosmetyczki. Niezwykła skuteczność i długotrwałe efekty sprawiają, że **HialuroFrax** staje się urządzeniem ponadczasowym.

Zespół włoskich naukowców opracował laser do zabiegów odmładzania i wypełniania zmarszczek – urządzenie to opiera się na synergicznym działaniu promieniowania laserowego oraz precyzyjnym frakcjonowaniu skóry. Kilka programów pozwala dobrać indywidualną terapię dla każdego pacjenta, co podnosi skuteczność zabiegów.

Laser diodowy emituje wiązkę o długości 905 nm, co umożliwia głęboką stymulację komórek skóry. Naświetlanie poszczególnych jej warstw skutecznie biostymuluje pracę komórek. Największy wpływ obserwuje się w fibroblastach – wzrasta produkcja nowych włókien kolagenowych, komórki szybciej się regenerują oraz przyspieszona zostaje przemiana materii na poziomie komórkowym. Jest to więc dobry sposób na poprawę ogólnej kondycji skóry.

Wykluczono też efekt przegrzania – dawka mocy została tak dobrana, aby skutecznie pobudzać komórki, ale nie przegrzewać tkanek. Podczas zabiegu temperatura wzrasta tylko o 1 OC.

Jednak to tylko jedno z najważniejszych zadań, jakie spełnia laser w urządzeniu **HialuroFrax**. Jego kluczową rolę jest aplikacja kwasu hialuronowego w głąb skóry.

Tajemnicą skuteczności **HialuroFraxa** jest nie tylko laser, ale również specjalne kosmetyki.

Jak wiemy, cząsteczka kwasu jest zbyt duża, aby przenikać przez mikropory skóry.

Wszystkie produkty wykorzystywane do zabiegu zostały opracowa-

ne i są produkowane w niemieckich laboratoriach. Dzięki przeprowadzonym testom potwierdzona została ich skuteczność.

W ampułkach z kwasem hialuronowym wykorzystano nanotechnologię – każda cząsteczka kwasu została podzielona na mniejsze, a te małe fragmenty zamknięto w specjalnych ochronnych kapsułkach, tzw. nanosferach. Nanosfery umożliwiają przenikanie, a także chronią cząsteczki kwasu przed uszkodzeniem podczas przenikania przez kolejne warstwy skóry, zapewniając prawidłowe ich działanie.

Po wnikięciu do skóry właściwej promieniowanie lasera diodowego ułatwia uwalnianie fragmentów kwasu hialuronowego i odtwarzanie pierwotnych struktur cząsteczki.

Jedna cząsteczka kwasu hialuronowego może związać co najmniej 250 cząsteczek wody, dzięki czemu wyrównana zostaje gospodarka wodna skóry, a przede wszystkim wypełnione zostają przestrzenie międzykomórkowe. Ten etap zabiegu daje efekt wypchnięcia wszystkich zmarszczek powstałych na skutek odwodnienia skóry, zdecydowanie poprawia się poziom nawilżenia, a jej struktura pozostaje jedwabiście gładka.

Ta bezinwazyjna metoda jest skutecznym sposobem opóźniania efek-

A 40



tów starzenia się skóry oraz doskonałym zabiegiem nawilżającym także dla osób młodych.




**HialuroFrax** został wyposażony w drugą głowicę, którą stosujemy na te najgłębsze, utrwalone już zmarszczki i bruzdy.

**FraxPen** w postaci poręcznego „długopisu”, wyposażony w system 12

nowne użycie, co czyni zabieg maksymalnie bezpiecznym.

Podczas pracy **FraxPenem** dochodzi do głębokiej perforacji naskórka, przez co zmuszany jest on do szybkiej odnowy. Frakcjonujemy w środowisku kwasu hialuronowego i poprzez żądła zapewniamy transport jego cząsteczek do skóry właściwej.

Bardzo ważnym elementem technologicznym jest opatentowana budowa igieł. Wykorzystano tu budowę żądła, aby nie przecinać skóry, jak robi to klasyczna igła, a jedynie rozpychać ją, dzięki czemu po iniekcji nie pozostają żadne ślady, a skóra bardzo szybko się regeneruje.

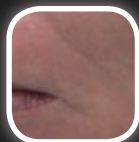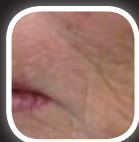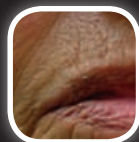

ultracienkich igieł, służy do frakcjonowania skóry oraz do aplikacji kwasu hialuronowego.

Bardzo ważnym elementem technologicznym jest opatentowana budowa igieł. Wykorzystano tu budowę żądła, aby nie przecinać skóry, jak robi to klasyczna igła, a jedynie rozpychać ją, dzięki czemu po iniekcji nie pozostają żadne ślady, a skóra bardzo szybko się regeneruje.

Powierzchnia frakcjonowania jest stosunkowo mała, dzięki czemu możemy precyzyjnie frakcjonować wybrane zmarszczki. We **FraxPenie** mamy płynną regulację długości żądał oraz 6 stopni prędkości ich pracy. Ze względu na sekwencyjne wysuwanie się igieł frakcjonowaniu nie towarzyszy ból. Moduły z igielkami są pakowane sterylnie i niemożliwe jest ich po-

Kwas hialuronowy wiąże wodę, frakcjonowanie zmusza naskórek do odnowy, a wywołany delikatny stan zapalny pobudza komórki skóry do silnej regeneracji. Takie wielopłaszczyznowe działanie zapewnia efekt niwelowania nawet najbardziej utrwalonych bruzd i zmarszczek.

Uzupełnienie działania lasera diodowego frakcjonowaniem gwarantuje spektakularne, a przede wszystkim długotrwałe efekty zabiegów dla skór wymagających i dojrzałych.

*Klientki bardzo często zadają pytanie: „Co daje lepsze efekty: klasyczne ostrzykiwanie czy HialuroFrax?”.*

Odpowiedź jest prosta: **HialuroFrax**.

Podczas klasycznego ostrzykiwania lekarz działa tylko na wskazaną zmarszczkę, a z pozostałą częścią twarzy nic się nie dzieje. Skóra nadal pozostaje zmęczona, przesuszona i pozbawiona blasku. **HialuroFrax** to zabieg obejmujący zawsze całą twarz, a także szyję i dekolt, jeśli wymagają tak intensywnej pielęgnacji – efekt widoczny jest od razu po zabiegu.

Po ostrzykiwaniu u lekarza pozostają ślady w postaci krwiałków i siniaków, często zdarza się nierównomierne rozłożenie kwasu. Po zabie-

gach **HialuroFraxa** kwas hialuronowy, dzięki odpowiednio dobranym ilościom i metodzie aplikacji, zawsze rozłożony jest równomiernie, a delikatne zaróżowienie skóry związane z frakcjonowaniem utrzymuje się maksymalnie kilkanaście godzin po zabiegu.

Musimy pamiętać również o tym, że lekarz stosuje do zabiegu igłę, a **FraxPen** – cieniutkie żądła.

Takie porównanie nie pozostawia wątpliwości – **HialuroFrax** to doskonałe rozwiązanie dla wymagających klientek Państwa gabinetów.

Serdecznie zapraszamy na indywidualne prezentacje urządzenia do centrum szkoleniowego **LestheZone** oraz na ogólnopolskie targi kosmetyczne, na których również odbywają się prezentacje **HialuroFraxa**.

Nie czekaj dłużej na doskonałość – już dziś wybierz ponadczasowe zabiegi **HialuroFrax**.



**LESTHÉ ZONE®**  
PROFESSIONNEL  
PROFESSIONNEL

LESTHEZONE  
al. Wojska Polskiego 17,  
41-500 Chorzów  
tel. 32 241 71 94, 501  
509 569, 508 143 567  
www.lesthezone.pl  
www.pewnyzabieg.pl